

## DESCRIZIONE

Cod. ADM1XXX

Contenitore in polipropilene traslucido (PP) con tappo in polietilene (PE) con doppia chiusura di sicurezza doppio/triplo imballo in barriera sterile in doppio strato: BoPET/PE Film + Tyvek® 1073B 100% HDPE.

## DESTINAZIONE D'USO

I dispositivi medici "CONTENITORI STERILI MONOUSO PER TESSUTI BIOLOGICI" sono contenitori plastici, immessi sul mercato in forma sterile, destinati alla conservazione di tessuti biologici o organi, destinati all'introduzione nel corpo umano.

I dispositivi sono destinati ad essere utilizzati in ambito professionale ed esclusivamente da personale specializzato (es.: medico), adeguatamente istruito ed a conoscenza delle istruzioni d'uso

## CONSERVAZIONE










Le condizioni di sterilità del dispositivo sono garantite se il proprio confezionamento si presenta integro e senza lesioni/fori. Questo dispositivo deve essere conservato, prima del suo utilizzo, ad una temperatura tra i 5°C ed i 30°C, al riparo dalla luce, in ambiente asciutto ed al riparo dalla polvere e dall'umidità.

## SCADENZA

Il termine di utilizzo del dispositivo è pari a 5 anni dalla produzione, se conservato nelle condizioni di conservazione consigliate. La scadenza è riferita al dispositivo integro. Non usare oltre la data di scadenza.

## AVVERTENZE GENERALI

- Non utilizzare se la confezione primaria presenta lesioni/fori o dubbi sulla sua integrità.
- Prima dell'utilizzo verificare l'integrità della confezione.
- Rispettando le opportune regole della operatività in asepsi inserire il tessuto all'interno del dispositivo apponendo il tappo e ruotandolo fino a completa chiusura.
- Nel rispetto delle procedure interne trasportare o conservare adeguatamente il tessuto evitando tutti i possibili shock termici o meccanici.
- Rispettando le opportune regole della operatività in asepsi rimuovere il tessuto dall'interno del dispositivo ruotando il tappo fino a completa apertura.
- Dispositivo Monouso. In caso di riutilizzo si può verificare perdita della sterilità e cross-contaminazione per il campione o l'operatore.
- Dopo il suo utilizzo e prima dell'eliminazione come rifiuto verificare le disposizioni interne in merito alla gestione dei rifiuti speciali. Si declina ogni responsabilità per lo scorretto utilizzo del dispositivo.
- Dispositivo sterile. Non risterilizzare il dispositivo.

Simboli utilizzati in etichetta			
	Non riutilizzare - Monouso		Fabbricante
	Codice prodotto		Sterilizzato per irraggiamento
	Lotto di produzione		Tenere lontano da luce fonti di calore
	Data di scadenza		Limiti di temperatura per lo stoccaggio
	Dispositivo Medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE		

  
AGRICONS RICERCHE  
via Cavalieri di Vittorio Veneto, 4  
35016 Piazzola sul Brenta (PD)  
tel.: 049-9601505 - fax: 049-9601271  
e-mail: info@agricons.it